



Calle 74 No. 15-13/15 Ofc. 501
Bogotá - Colombia
Tel. (57.1) 7024960, 3106285948
www.laboutique.com.co

TERAPIA DE SUEÑO



MASCARA AIRFIT F30 INVIMA 2011DM-0007932



FICHA TÉCNICA

La máscara AirFit F30 está diseñada para ser utilizada por pacientes que pesen más de 66 lb (30 kg) a quienes se les ha prescrito una vía aérea positiva no invasiva terapia de presión (PAP) como CPAP o terapia de dos niveles. La máscara es destinada a la reutilización de un solo paciente en el hogar y la reutilización de múltiples pacientes en El entorno hospitalario / institucional. Lea la guía completa antes de usar. Codo de aire silencioso El codo QuietAir está destinado a la reutilización de un solo paciente en el hogar y entorno hospitalario / institucional. Contraindicaciones El uso de máscaras con componentes magnéticos está contraindicado en pacientes. Con las siguientes condiciones preexistentes:

- Un clip hemostático metálico implantado en su cabeza para reparar un aneurisma
- Astillas metálicas en uno o ambos ojos.

Antes de usar tu máscara Retire todo el embalaje e inspeccione cada componente de la máscara para ver deterioro. Use la plantilla de ajuste para ayudar a seleccionar el cojín del tamaño correcto y marco

ESPECIFICACIONES

Presión de terapia: 3 a 30 cm H₂O

Resistencia con válvula antiasfixia cerrada a la atmósfera

- Caída de presión medida (nominal) a 50 L / min: 0.3 cm H₂O
- Caída de presión medida (nominal) a 100 L / min: 0.7 cm H₂O

Resistencia inspiratoria y espiratoria con válvula antiasfixia abierta a atmósfera

- Inspiración a 50 L / min: 0.6 cm H₂O
- Caducidad a 50 L / min: 0.8 cm H₂O

 <p>LA BOUTIQUE DEL CUIDADO RESPIRATORIO</p>	<p>Calle 74 No. 15-13/15 Ofc. 501 Bogotá - Colombia Tel. (57.1) 7024960, 3106285948 www.laboutique.com.co</p>	<p>TERAPIA DE SUEÑO</p>	 <p>ResMed</p>
--	---	------------------------------------	--

BENEFICIOS

- En estudios recientes, la máscara AirFit™ F30 de ResMed fue la más preferida de su tipo^{2,3}. La mayoría de los usuarios de CPAP la encontraron más fácil de usar y más cómoda que la máscara oro nasal de contacto mínimo, líder en el mercado.
- Con una máscara de contacto mínimo como AirFit F30, experimentarás menos marcas faciales que con una máscara oro nasal tradicional. Su cojín UltraCompact está diseñado para sellar de manera segura debajo de la nariz para evitar el dolor/irritación/marcas rojas en la parte superior de la nariz.

VENTAJAS DIFERENCIALES

- Elimina la pared de almohadas que te separan de tu compañero(a) de cama y acurrúcate aún más con AirFit F30. Es más silencioso que la máscara oro nasal de contacto mínimo, líder en el mercado^{4,5} con menos interrupciones del sueño por el flujo de ventilación notado por los usuarios de CPAP y sus compañeros de cama². Con pequeñas aberturas multidireccionales en un área extendida, tecnología de ventilación en el codo, la máscara QuietAir™ de ResMed tira el aire exhalado para que se extienda ligeramente.
- Una mascarilla oro nasal, de estilo más pequeño, diseñada para acomodarse sobre tu rostro y cubrir menos, dejando menos marcas faciales¹
- Siéntete más seguro(a) con tus seres queridos con un aspecto simple y moderno
- Perfecto para usar anteojos, dormir de lado y ayudarte a sentirte menos claustrofóbico(a)

ACCESORIOS

- ✓ Manual fácil uso
- ✓ Arnés

VIDA ÚTIL

- ✓ 2 meses dependiendo del uso y cuidados del paciente